

GUIDE TECHNIQUE

Terrawheels



Le fauteuil de plage dédié aux personnes à mobilité réduite

SOMMAIRE

Définition du produit	02
Caractéristiques techniques	02
Accessoires du produit	03
Conditions d'utilisation	04
Garantie	04
Références	05

DEFINITION DU PRODUIT

Le fauteuil Terrawheels est spécifiquement dédié au déplacement sur la plage des personnes à mobilité réduite. Les quatre roues ballons dont dispose le fauteuil facilitent l'escorte de l'utilisateur afin de profiter pleinement des joies des promenades sur les plages.

CARACTERISTIQUES GENERALES

DIMENSIONS / INFORMATIONS TECHNIQUES :

Largeur siège	Largeur d'un accoudoir	Largeur avec les accoudoirs	Longueur siège	Longueur totale
56 cm	7,5 cm	72 cm	52 cm	1,05 m

POIDS :

- Poids : 40 kg
- Poids maximal supporté : 115 kg

MATERIAUX :


- Dossier fabriqué avec un tissu résistant aux UV et à l'eau
- Roues : pneumatique caoutchouc
- Essieu : acier inoxydable
- Châssis : Aluminium pliant
- Chariot : inoxydable

COULEURS :

- Rayures verticales bleues et blanches
- Roues "ballon" jaunes



DESCRIPTIF DES ELEMENTS

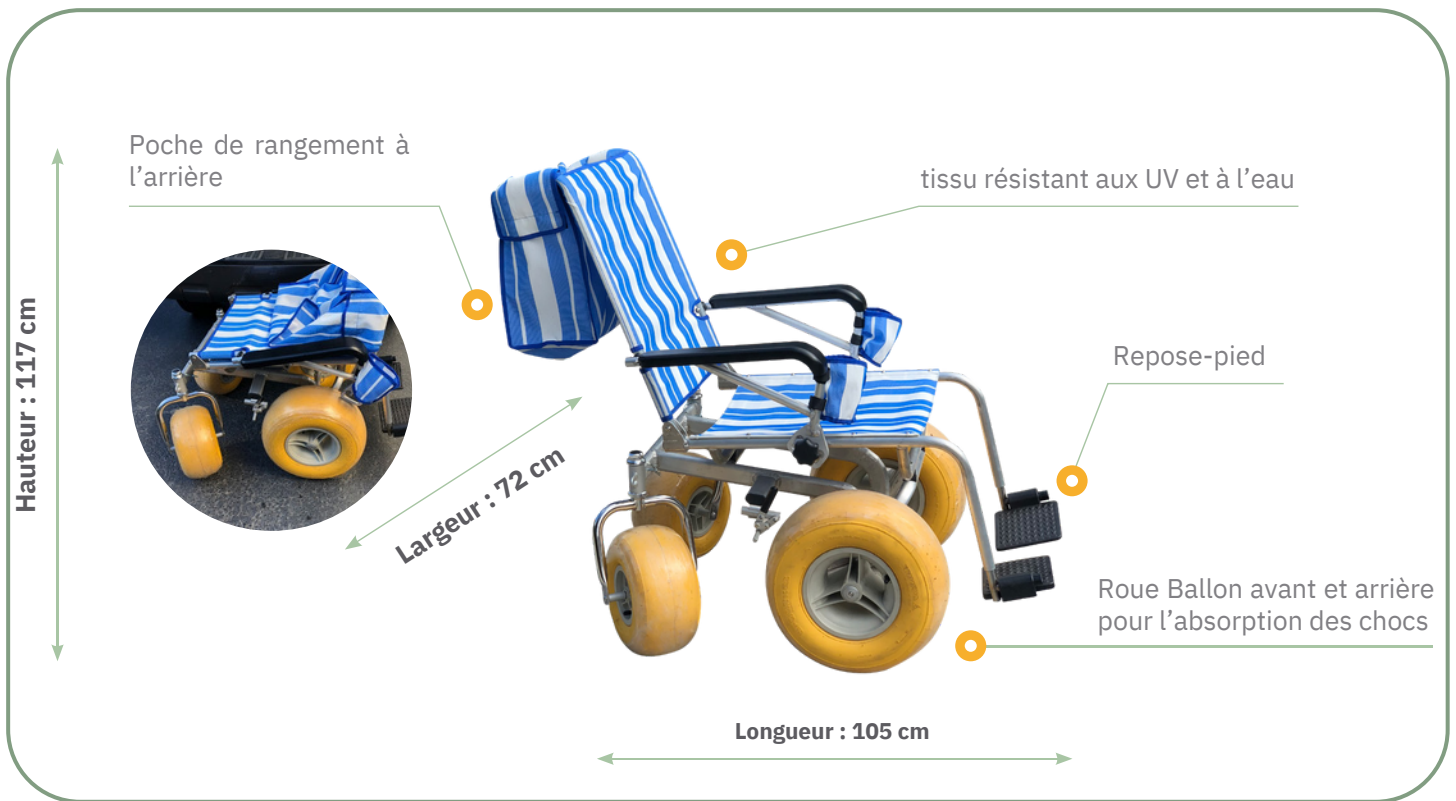

ATOUPS



- Confortable
- 3 positions d'assise
- Très bonne stabilité sur le sable
- Largeur adaptée pour le passage des portes
- Maintenance rapide
- Montage et démontage aisé sans outils
- Sécurité assurée : présence de freins
- Pliable : facilement transportable et stockable

ACCESSOIRES DU PRODUIT



Poche de rangement :

Une poche de rangement est prévue à l'arrière du fauteuil TerraWheels afin d'apporter plus de confort et de praticité à l'utilisateur.

Ceinture ventrale :

Le fauteuil TerraWheels dispose d'une ceinture ventrale afin d'éviter toute chute lors des déplacements. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter des joies d'une promenade avec stabilité et confort.

Repose pieds :

Le fauteuil TerraWheels possède aussi un repose-pieds pour assurer à l'utilisateur un confort total lors de son utilisation.



CONDITIONS D'UTILISATION

Le fauteuil TerraWheels® est spécifiquement dédié au déplacement sur terrains meubles des personnes à mobilité réduite.

Tout utilisateur doit obligatoirement être escorté à chaque utilisation.

Le déplacement sur du sable fin doit s'effectuer avec la position assise en arrière, attention à la position du dossier qui ne doit pas être totalement verticale.

Le Terrawheels se compose de 5 parties :

- 4 roues caoutchouc
- 1 châssis (avec assise, dossier et 2 accoudoirs)

Il peut être assemblé rapidement et facilement (assemblé et/ou démonté en moins de 5 minutes et sans outils).

NOS RECOMMANDATIONS :

- Pensez à rincer régulièrement avec de l'eau claire votre Terrawheels, notamment au niveau des roues ballons afin de limiter l'endommagement des composants par l'eau de mer.
- Ne pas utiliser les éléments du fauteuil roulant à toute autre fin que celle pour laquelle ils ont été conçus. Nous vous déconseillons fortement d'utiliser les pièces détachées du Terrawheels pour soutenir des choses lourdes ou pour soulever le fauteuil. Une mauvaise utilisation des éléments du fauteuil roulant pourrait amener les pièces à se détacher et causer des blessures.
- Vérifiez régulièrement la pression des roues afin qu'elles soient à 0,48 bar (7psi).

GARANTIE

AccessRec Europe offre une garantie de deux (2) ans à partir de la date d'achat qui couvre les défauts des matériaux ou de fabrication, uniquement pour le cadre TerraWheels®. La garantie ne s'applique pas sur le textile, les accoudoirs ou les pneus. Toutes les limitations de la garantie seront évaluées par AccessRec Europe.

La garantie limitée ne couvre pas les dommages subis par TerraWheels® en raison de :

- l'usure normale ;
- d'un entretien inapproprié ;
- d'un mauvais usage, de la maintenance ou du stockage de TerraWheels® ;
- d'un accident ou d'une catastrophe naturelle ;
- des modifications qui ont été faites sur TerraWheels® sans le consentement écrit d'AccessRec Europe ;
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit d'AccessRec Europe.

Cette garantie ne couvre pas les frais de main-d'oeuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si le châssis de TerraWheels doit être remplacé ou réparé. Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement AccessRec Europe. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement d'AccessRec Europe. La garantie de deux (2) ans est seulement applicable à l'acheteur original.

REFERENCES



Scannez moi pour découvrir l'intégralité de notre
gamme de fauteuils et équipements