

GUIDE TECHNIQUE

Sunwheels



Le fauteuil économique pour la plage et la piscine

SOMMAIRE

Définition du produit	02
Caractéristiques techniques	02
Accessoires du produit	03
Conditions d'utilisation	03
Montage	04
Garantie	05
Références	05

DEFINITION DU PRODUIT

Le fauteuil Sunwheels est un fauteuil économique dédié au déplacement des personnes à mobilité réduite afin qu'elles puissent profiter des joies de la plage et de la piscine. Il possède une deuxième fonction qui est l'aide à la mise à l'eau rapide et en toute sécurité des utilisateurs.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS / INFORMATIONS TECHNIQUES :

Largeur	Longueur	Hauteur	Hauteur de l'assise	Largeur assise	Profondeur assise	Diamètre roue arrière
48 cm	105 cm	85 cm	34 cm	46 cm	39 cm	44 cm

Composition*	Poids fauteuil	Couleur(s)	Capacité de poids	Poids colis	Dimensions colis	Diamètre roue avant (option)
Polyéthylène Aluminium Epoxy	12 kg	bleu orange	min : 25 kg max : 120 kg	15 kg	110 x 37 x 59 cm	29 cm

***Note :** Roues polyéthylène - Châssis en aluminium avec traitement galvanisé - Peinture époxy en poudre.

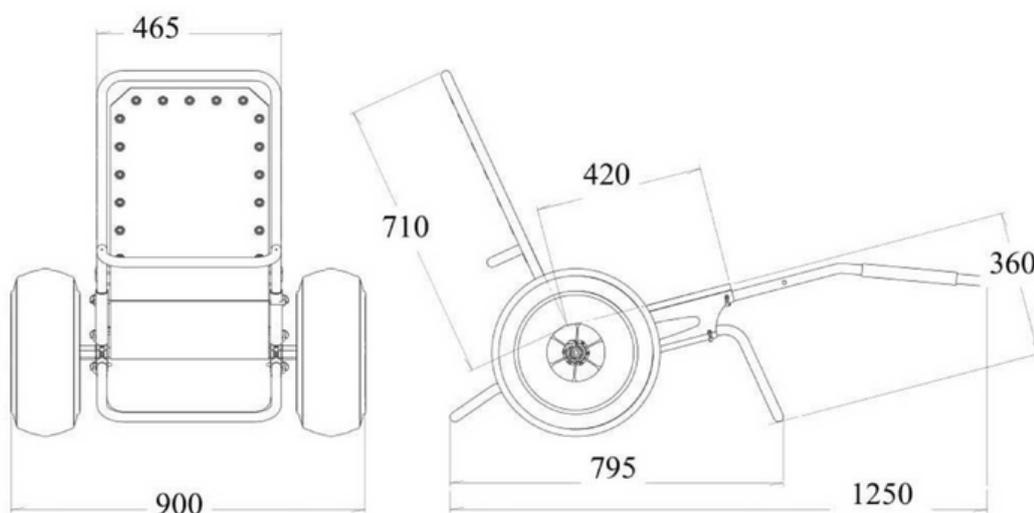

ATOUTS

- Cadre pliable et démontable sans outils (facile à transporter)
- Châssis traité anti-corrosion
- Roues polyéthylène flottantes, idéales pour le sable
- Nombreuses options disponibles (accoudoirs, ceinture de sécurité,...)
- Solution économique
- Répond aux normes d'accessibilité pour les gérants de piscines et/ ou résidences touristiques
- Conforme aux normes EN12182 CE ; EN13485 CE
- Tissu adapté pour sécher rapidement



ACCESSOIRES DU PRODUIT

Pièces détachées à retrouver dans votre colis

- Dossier
- Repose-pieds
- Barre anti-basculement
- Châssis avec les fixations
- 2 roues et leur fixation
- 8 fixations pour châssis
- 8 fixations de remplacement
- Paire d'accoudoirs

OPTION 1

Disponible en option : un sac de transport Sunwheels

- Longueur : 102 cm
- Largeur : 58,5 cm
- Hauteur : 36,5 cm
- Poids chargé : 13 kg



Accessoires disponibles en supplément

- Ceinture de sécurité
- Sac de transport
- Kit 3ème roue
- Ombrelle



CONDITIONS D'UTILISATION

Le fauteuil SunWheels est spécifiquement dédié au déplacement sur terrains meubles des personnes à mobilité réduite. Tout utilisateur doit obligatoirement être escorté à chaque utilisation.

SunWheels® n'est pas conçu pour le mauvais temps ou pour flotter dans une eau agitée. Notre fauteuil est idéal pour faciliter l'accès aux piscines et aux mers / lacs calmes.

Tout usage du SunWheels® doit être effectué avec un accompagnateur. Pour leur sécurité, il est conseillé aux utilisateurs de porter un gilet de sauvetage dans l'eau. Merci de vérifier les lois locales et d'état concernant la réglementation sur le port du gilet de sauvetage.

LIMITE DE POIDS : Le poids maximum pour les utilisateurs est de 120 kg.


Attention :

Ne pas utiliser les éléments du fauteuil roulant à toute autre fin que celle pour laquelle ils ont été conçus. Il est par exemple fortement déconseillé d'utiliser les pièces détachées pour soutenir des choses lourdes ou pour soulever le fauteuil roulant. Une mauvaise utilisation des éléments du fauteuil roulant pourrait amener les pièces à se détacher, causant des blessures. SunWheels a été conçu pour offrir confort et stabilité lors de son utilisation. Un transfert de poids ou des surfaces accidentées pourrait faire se retourner le fauteuil roulant et provoquer des blessures. Pour augmenter votre sécurité, il est donc recommandé de porter la ceinture de sécurité lors de tout déplacement.

MONTAGE


ETAPE 1 :

Fixez la barre de dossier rembourrée, le support rembourré et la barre de liaison à roulettes au châssis avec les goupilles de fixation comme indiqué sur le croquis. Fixez les roues au cadre principal comme illustré. Assurez vous que les tubes sont correctement verrouillés.

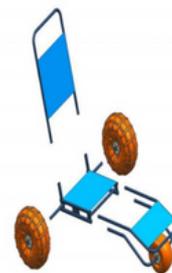


ETAPE 2 :

Insérez les roues sur l'axe du châssis comme indiqué sur le croquis. Utiliser le trou spécial sur le moyeu, préalablement aligné avec le trou présent sur l'axe du châssis et insérez l'attache. Assurez vous que chaque attache de roue est correctement verrouillée sur le moyeu.

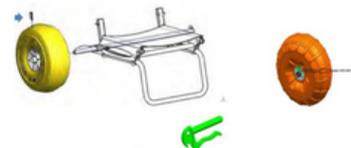

ETAPE 3 :

Insérez le dossier dans les bagues du châssis, puis insérez les 2 attaches profondément à travers les trous appropriés pour le verrouiller. Assurez vous que les attaches sont correctement verrouillées sur le cadre principal. Ensuite, fixez la bande située sur l'extrémité inférieure du dossier, en la faisant passer autour de l'axe des roues comme sur le croquis.

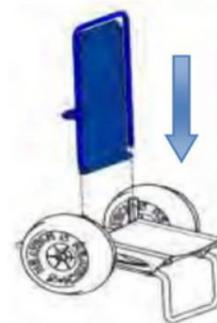


ETAPE 4 : Réglage du repose jambes

Pour régler la position du repose jambes, retirez les attaches comme sur le schéma. Placez le repose jambes dans l'une des trois positions disponibles et réinsérez les attaches.




ETAPE 5 : Barre anti basculement

Pour changer la barre anti basculement, retirez les deux attaches et tirez sur la barre. Insérez la nouvelle barre dans la même position et assurez vous d'insérer correctement les attaches.

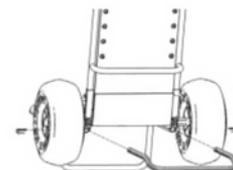


ETAPE 6 : Montage de la 3ème roue avant (option)

Pour monter la troisième roue, dévissez les deux boulons (L) à l'aide d'une clé Allen de 5 mm, agrandissez les deux tubes et retirez la roue. Insérez la roue, fixez les deux tubes et assurez vous de bien serrer les boulons précédemment retirés.

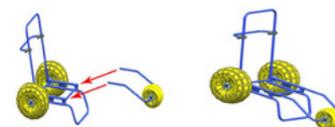

ETAPE 7 : Montage des accoudoirs (option)

Assemblez l'accoudoir (droit et gauche) au dossier comme indiqué ci-dessous. Pour assurer une connexion correcte, serrez les deux vis avec une clé Allen de 6 mm.

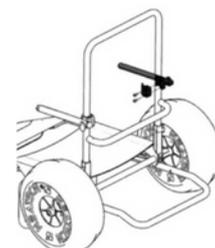

GARANTIE

Accessrec Europe offre une garantie de deux (2) ans à partir de la date d'achat du Sunwheels. Cette garantie ne couvre que les défauts de matériaux ou de fabrication.

La garantie ne couvre pas les pièces sujettes ou endommagées par :

- l'usure normale des solutions
- une surcharge
- un mauvais usage, maintenance ou stockage de la solution
- un accident ou une catastrophe naturelle
- des modifications qui ont été faites sur la solution sans le consentement écrit d'AccessRec Europe.
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit d'AccessRec Europe.
- les frais de main d'œuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si des réparations sont envisagées.

Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement Accessrec Europe. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement d'AccessRec Europe. La garantie de deux (2) ans est seulement applicable à l'acheteur original.

REFERENCES



Scannez moi pour découvrir l'intégralité de notre gamme de fauteuils et équipements