

GUIDE TECHNIQUE ET D'UTILISATION



Aquaccess FIXE




Aquaccess Fixe est un élévateur pour piscine adapté aux personnes à mobilité réduite, idéal pour l'accès à l'eau en toute autonomie

SOMMAIRE

Caractéristiques générales	02
Accessoires du produit	03
Conditions d'utilisation et installation	04
Garantie	09
Références	09

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

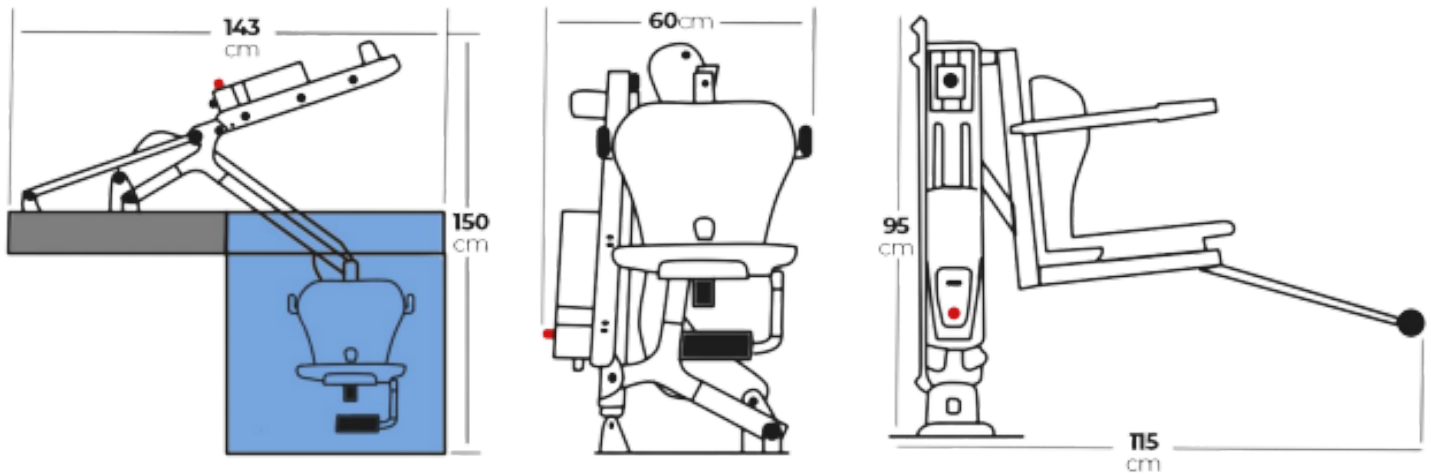

DIMENSIONS :

- **Hauteur :** 95 cm
- **Longueur :** 115 cm
- **Largeur (entre les accoudoirs) :** .. cm
- **Hauteur assise :** 61 cm
- **Hauteur guidon :** 105 cm
- **Largeur guidon :** 57,5 cm

POIDS :

- **Poids :** 50 kg
- **Poids maximal supporté :** 150 kg

MATIÈRE :

- **Châssis :** Acier Inoxydable ST-52 (304 quality stainless steel)

COULEUR :

- Blanc



ATOUTS :

- Idéal en milieu humide : fabriqué entièrement en acier inoxydable, peinture résistante à l'abrasion et à la corrosion, télécommande étanche
- Sécurité : transfert sûr, système de sauvetage d'urgence
- Confort : mécanisme du siège et repose-pied réglable, accoudoir pliable
- Pratique : chargeur externe
- Assemblage et installation rapide

OÙ INSTALLER AQUACCESS FIXE ?

- Installations thermales
- Piscines d'hydrothérapie pour personnes à mobilité réduite
- Fédérations sportives
- Hôtels de tourisme de santé pour personnes handicapées et âgées
- Piscines publiques
- Piscines pour personnes handicapées
- Piscines privées
- Centres de soins pour personnes âgées.
- Centres de villégiature
- Piscines extérieures dans les hôtels.
- Centres de réadaptation hôtelière clinique

ACCESSOIRES DU PRODUIT

- 1- Pièces mécaniques et sièges de l'élévateur
- 2- Ceinture de sécurité
- 3- Unité de contrôle
- 4- Batterie
- 5- Chargeur de batterie
- 6- Télécommande
- 7- Equipements de fixation au sol



CONDITIONS D'UTILISATION ET INSTALLATION

LES RÈGLES À RESPECTER :


- Pour utiliser l'élévateur en toute sécurité, vous devez suivre les instructions d'installation et d'utilisation.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec et autour de l'élévateur.
- N'exposez pas les composants électroniques à la pression directe de l'eau.
- Ne vous asseyez pas sur l'élévateur de piscine lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la piscine.
- Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser dans une situation où personne ne peut vous aider en cas d'urgence.
- Ne pas utiliser sans ceinture de sécurité
- Appuyez sur le bouton d'arrêt en cas d'urgence

CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE DE MONTAGE ET DES NORMES

A. Zone de montage de l'élévateur selon l'ADA (American Disabled Law)

Aquaccess Fixe a été fabriqué conformément aux normes ADA.


- Un espace libre est requis sur le côté de la machine (Schéma 1)
- La distance entre le centre du siège et le bord de la piscine doit être de 40,5 cm minimum en position fermée.
- **La pente de la piscine ne doit pas être supérieure à 1:48.**
- L'assise du siège doit pénétrer dans l'eau d'au moins 45,5cm
- Si la profondeur de l'eau de la piscine ne dépasse pas 122 cm, il doit être installé dans cette zone. S'il y a une profondeur de plus de 122 cm dans toute la piscine, cette condition n'est pas requise.

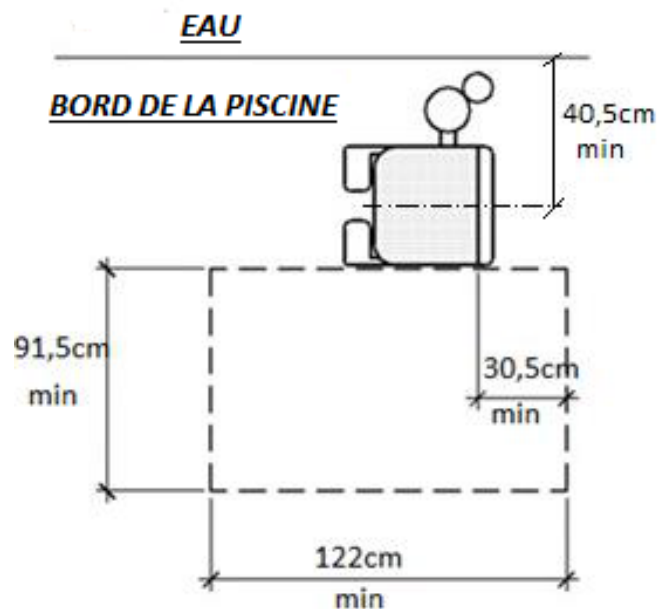

SCHEMA 1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Vérifiez tous les matériaux avant l'installation, lisez les instructions.
- L'installation doit être effectuée avec soin, une installation incorrecte peut affecter la sécurité de l'utilisateur et annulera la garantie des élévateurs Aquaccess Fixe.
- L'élévateur doit être installé sur le bord de la piscine pour couvrir les dimensions spécifiées dans les normes (A).
- Les points à considérer lors de l'installation sont de ne pas sortir de la norme, d'être monté en fonction de l'état du canal d'évacuation de l'eau sur le côté de la piscine et de faire l'installation de manière à ne pas risquer d'autres facteurs dangereux.

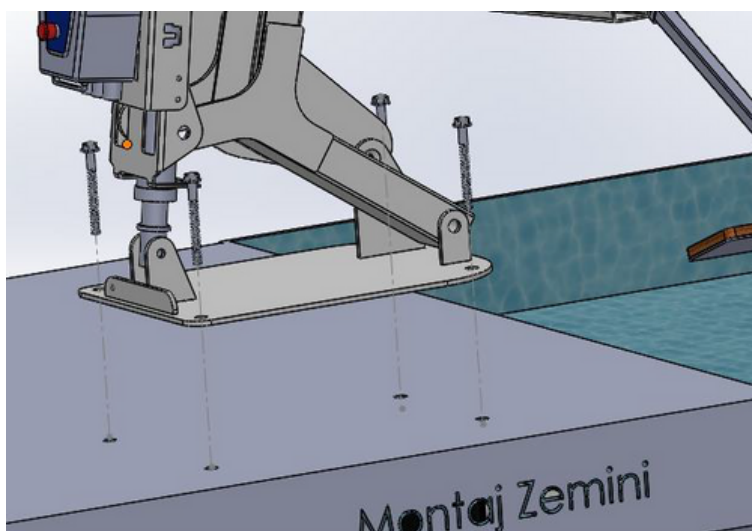

SCHEMA 2 (Fixation au sol)

- 1) 4 trous sont percés dans le sol pour centrer la machine à travers les trous de la base.
- 2) Puis on la fixe au sol à l'aide de la visserie fournie.

- Vis Trifon 10X100 qualité inox A2
- Rondelle inox A2
- Cheville



IMAGE 3 (vis de fixation au sol)

PROGRAMME D'ENTRETIEN PÉRIODIQUE DE LA SOLUTION Aquaccess FIXE

Instructions d'entretien	JOURNALIER	HEBDOMADAIRE	MENSUEL
Rincer à l'eau claire et nettoyer (Ne pas appliquer d'eau sous pression directement sur les composants électroniques de l'élévateur)	✓		
Chargez la batterie	✓		
Pour s'assurer qu'il fonctionne sans problème, faites fonctionner l'élévateur 1 fois pour qu'il effectue son mouvement complet sans personne dessus.	✓		
Vérifiez que l'élévateur n'est pas endommagé, corrodé et que le matériel n'est pas desserré ou manquant.	✓		
Contrôlez tous les points de connexion et vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés ou corrodés.		✓	
Nettoyer, réparer et enlever la graisse diélectrique de toutes les pièces. Vérifier et appliquer.		✓	
Vérifiez les étiquettes d'avertissement et remplacez-les si elles sont usées			✓

REMARQUES SUR L'ENTRETIEN :

- Nettoyer l'élévateur avec de l'eau propre uniquement, ne pas utiliser d'eau de piscine.
- Essuyez avec un chiffon propre, doux et non abrasif.
- Ne pas exposer l'élévateur à des composants électroniques ou à une pression d'eau directe pendant le nettoyage de l'élévateur.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec et autour de l'élévateur.
- Ne pas stocker l'élévateur dans un endroit où il peut subir des chocs et entrer en contact avec des produits chimiques

UTILISATION DE L'AQUACCESS FIXE DANS LA PISCINE :

ENTRÉE DANS LA PISCINE

Etape 1 : S'asseoir sur le siège et attacher la ceinture de sécurité

Etape 2 : Placez votre pied sur la béquille

Etape 3 : S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles ou de risques le long de la zone de l'élévateur.

Etape 4 : Tenez la commande manuelle et maintenez le bouton de levage enfoncé (jusqu'à ce qu'il soit suffisamment enfoncé pour la sécurité)

Etape 5 : Maintenez la commande jusqu'à la fin de l'opération de levage.

Etape 6 : Dévissez votre ceinture après l'arrêt de l'élévateur.

SORTIR DE LA PISCINE :

Étape 1 : S'asseoir sur le siège et attacher la ceinture de sécurité

Étape 2 : Placez votre pied sur la béquille

Étape 3 : S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles ou de risques le long de la zone de levage.

Étape 4 : Maintenez la commande manuelle et le bouton d'arrêt du levage

Étape 5 : Maintenez la commande jusqu'à ce que l'opération de levage soit terminée

Étape 6 : Défaire votre ceinture de sécurité après l'arrêt du levage.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES SIMPLES :

- **L'élévateur de piscine ne bouge pas**

Solution 1 : Le câble de l'unité de commande peut être débranché.

Dans ce cas, assurez-vous que le câble de l'appareil est connecté à l'unité de commande.

Solution 2 : Les éléments de connexion entre l'unité de commande et l'actionneur peuvent être délogés.

Dans ce cas, assurez-vous que les connexions entre l'unité de commande et l'actionneur sont entièrement connectées.

Solution 3 : La batterie (pile) peut être déchargée

La batterie peut être épuisée ou hors d'usage en fonction de son utilisation.

Dans ce cas, essayez de charger et de remettre en service la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée avec le chargeur.

Si après cela votre problème n'est pas résolu, n'entreprenez aucune autre action, veuillez appeler notre société pour obtenir les conseils nécessaires de l'équipe technique. (Tél : 03 83 71 67 11)

NORMES

Certifié ISO 9001 et ISO 13485

Conformité UE - Certifié CE

GARANTIE

AccessRec Europe offre une garantie de deux (2) ans à partir de la date d'achat qui couvre les défauts des matériaux ou de fabrication.. La garantie ne s'applique pas sur les accoudoirs ou les pneus. Toutes les limitations de la garantie seront évaluées par AccessRec Europe.

La garantie limitée ne couvre pas les dommages subis par Aquaccess Fixe en raison de :

- l'usure normale ;
- d'un entretien inapproprié ;
- d'un mauvais usage, de la maintenance ou du stockage de Aquaccess Fixe ;
- d'un accident ou d'une catastrophe naturelle ;
- des modifications qui ont été faites sur Aquaccess Fixe sans le consentement écrit d'AccessRec Europe ;
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit d'AccessRec Europe.

Cette garantie ne couvre pas les frais de main-d'oeuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si le châssis de Aquaccess Fixe doit être remplacé ou réparé. Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement AccessRec Europe. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement d'AccessRec Europe. La garantie de deux (2) ans est seulement applicable à l'acheteur original.

RÉFÉRENCES



Aquaccess Fixe dans un camping à Vias, France