


Aquaccess Mobile

L'élévateur mobile
pour piscine

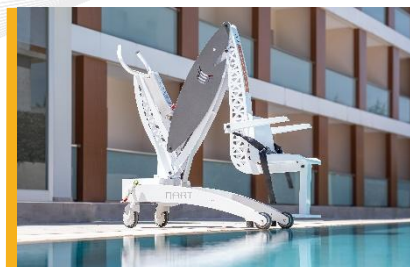

Aquaccess Mobile est un élévateur mobile pour piscine adapté aux PMR, idéal pour le transfert et le déplacement confortable du vestiaire au bord de la piscine.

Cet élévateur mobile a été conçu pour résoudre les problèmes d'accès à l'eau à moindre coût.



AVANTAGES



> Batterie détachable, rechargeable avec indicateur de charge

> 100% en acier inoxydable, télécommande étanche, siège et roues adaptés pour milieu humide

> Ceinture de sécurité et repose-pieds réglables, frein manuel et verrouillage automatique

> Livré avec une bâche de protection

> Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'égalité des droits et des chances qui met en place l'obligation d'accessibilité dans la vie collective

Spécificités techniques

Matériels	Châssis : Acier Inoxydable ST-52 (304 quality stainless steel) Peinture en poudre électrostatique résistante à l'usure et à la corrosion			
Dimensions de l'Aquaccess Mobile	Hauteur	Longueur	Largeur (entre accoudoirs)	Hauteur d'assise réglable
	156 cm 61"	144 cm 57"	54,5 cm 21"	56 cm 22"
	Hauteur guidon	Poids	Poids maximal supporté	
	105 cm 41"	200 kg 440 lbs	135 kg 298 lbs	
Couleurs	Blanc, accoudoirs noirs et roues grises			
Temps de fonctionnement	Descente dans l'eau : 45 secondes Sortie de l'eau : 55 secondes			
Cet élévateur mobile peut être utilisé dans les piscines intérieures et extérieures. Il peut descendre jusqu'à 70 cm depuis le rebord de votre piscine ! <i>Ce produit est adapté uniquement pour les piscines creusées</i>				

Conditions d'utilisation

L'Aquaccess mobile est un élévateur mobile pour piscine adapté aux personnes à mobilité réduite, idéal pour le transfert et le déplacement du vestiaire au bord de la piscine en toute simplicité et de façon autonome. Il est équipé de roues médicales, d'une batterie rechargeable et d'un actionneur.

Avec sa taille adaptée, l'Aquaccess Mobile est conçu pour effectuer des transferts en toute sécurité du fauteuil roulant jusqu'au bassin de la piscine.

Les matériaux de qualité ainsi qu'un entretien régulier de l'élévateur garantiront une durée de vie d'au moins 10 ans.

Le mécanisme du siège est réglable, ce qui le rend confortable. Ainsi, il s'adapte à toutes les morphologies (poids maximal : 135 kg), convient aux enfants et différents handicaps.

Installation et maintenance

INSTALLATION

Aquaccess Mobile se monte et s'installe très facilement. Il offre un accès simplifié aux piscines intérieures et extérieures. Peu encombrant, cet élévateur mobile de piscine se replie pour un stockage optimisé.

L'installation ne nécessite pas de fixation permanente : l'appareil doit être positionné sur une surface plane, stable et dégagée, à proximité du bassin. Il est essentiel de respecter les distances de sécurité par rapport au bord de la piscine afin d'assurer un transfert sécurisé de l'utilisateur. Avant la mise en service, il convient de vérifier la stabilité de l'élévateur, le bon fonctionnement des commandes et la conformité de l'environnement aux recommandations du fabricant.



MAINTENANCE


La maintenance de l'Aquaccess Mobile consiste à rincer l'appareil à l'eau claire après usage, à recharger régulièrement la batterie et à vérifier fréquemment le bon fonctionnement du mécanisme.

Des contrôles visuels permettent de détecter l'usure, la corrosion ou des pièces desserrées, tandis que les éléments mobiles doivent être nettoyés et lubrifiés si nécessaire afin de garantir la sécurité et la longévité de l'équipement.



Où installer l'Aquaccess Mobile ?

- Installations thermales
- Piscines d'hydrothérapie pour PMR
- Fédérations sportives
- Hôtels de tourisme de santé pour personnes handicapées et âgées
- Piscines publiques
- Piscines privées
- Centres de soins pour personnes âgées
- Centres de villégiature
- Piscines extérieures dans les hôtels
- Centres de réadaptation hôtelière clinique

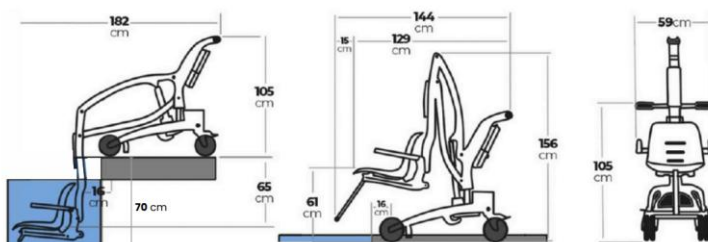

Quels sont nos équipements additionnels ?

Mobi-mat® Tapis d'accès



Mobi-roller™ Dérouleur manuel



Mobi-com™ Tapis publicitaire



Mobi-walk Déambulateur tout-terrain



 info@mobi-mat.com